

# Anaftin® Baby gels zobu šķilšanās laikā

Anaftin® Baby ir bioadhezīvs gels lietošanai mutes dobumā. Tas ātri izveido neredzamu plēvīti, kas aizsargā smaganas no nepatīkamām sajūtām un sāpēm. Tā dabīgās sastāvdaļas palīdz atvieglot sāpes un apsārtumu skartajā apvidū.

Aplikatoram ir silikona sari, kas maigi masē smaganas, tādējādi atvieglojot ar zobu šķilšanos saistīto nepatīkamo sajūtu un simptomus.



Anaftin® Baby nesatur vietējas darbības anestēzijas līdzekļus, zāles, etilspirtu vai cukuru. Anaftin® Baby lietošanas laikā neizraisa dedzināšanas sajūtu, un tam ir patīkama banānu garša.

## Lietošanas norādījumi

Uzklājiet pietiekami daudz gela, lai nosegtu skarto apvidu, un maigi pamasējiet smaganas ar aplikatoru.

Vēlams uzklāt pēc maltītēm un pirms mazuļa aizmigšanas, lai veicinātu plēvītes izveidošanos un paildzinātu sāpes atvieglojošo efektu mazajam pacientam. Lietot tik bieži, cik nepieciešams. Pēc katras lietošanas reizes uzskrūvēt atpakaļ vāciņu. Noslaucīt gela atlikumu, kas var traucēt uzklāt gelu nākamajā lietošanas reizē.

## Sastāvdaļas

Ūdens, polivinilpirolidons (PVP), maltodekstrīns, propilēnglikols, PEG-40 hidroģenēta rīcineļļa, *Aloe barbadensis*, ksantāna sveķi, aromātviela, kālija sorbāts, nātrija benzoāts, dinātrija EDTA, nātrija hialuronāts, ksilitols, cetilpiridīnija hlorīds, gliciretīnskābe, *Crocus sativus*.

## Uzmanību!

Katru Anaftin® Baby tūbiņu drīkst lietot tikai vienam konkrētam pacientam, lai izvairītos no aplikatora un gela krusteniskas kontaminācijas. Anaftin® Baby lietošana ir kontrindicēta pacientiem, kuriem ir zināma paaugstināta jutība pret kādu no sastāvdaļām. Ja esat grūtniece, pirms preparāta lietošanas konsultējieties ar ārstu.

## Piesardzības pasākumi un brīdinājumi

### UZMANĪBU!

Šo preparātu drīkst lietot tikai ar pieaugušo palīdzību.

Šī medicīniskā ierīce nav rotaļlieta! NEKAD neatstājiet to bērna rokās. Nosmakšanas risks!

Pirms lietošanas pārbaudiet medicīnisko ierīci, vai tai nav nodiluma pazīmju, un gela lietošanas laikā pievērsiet uzmanību tam, lai nejauši neatvienotos aplikatora galviņas daļas. Ja tā notiek, pārtrauciet medicīniskās ierīces lietošanu.

Nemēģiniet piestiprināt atpakaļ atdalījušos daļu.

Kad gels ir beidzies, pārtrauciet ierīces lietošanu.

Nelietot pēc derīguma termiņa vai tad, ja tūbiņa izskatās bojāta vai ir konstatējama noplūde. Glabāt istabas temperatūrā, sargājot no tiešas karstuma iedarbības.


Nesasaldēt.

### Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Augšzobi



Apakšzobi

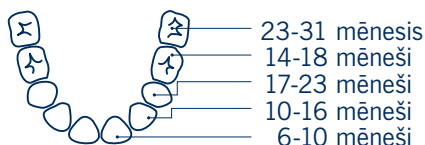

### Tilpums

10 ml

### Ražotājs:

Alliance Pharma Srl,  
Viale Restelli 5, 20124 Milan, Itālija



### Izplatītājs:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP),  
Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Vācija

### Pārskatīts 09/2016